


Sengehest- vejledning



OBS!

Hvis VENDLET ikke benyttes som sengehest, skal motorrullerne være sænket, når patienten forlades i sengen.

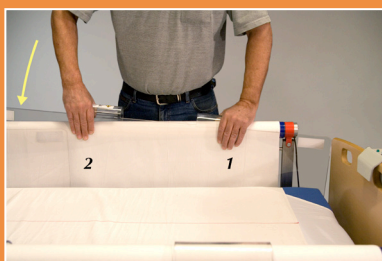



Hvis VENDLET benyttes som sengehest

Benyttes VENDLET som sengehest, hæv motorrullerne og monter sengehestene af plast, inden patienten forlades.

Brug 2 sengeheste på hver motorrulle. Hvis sengens hoved- eller fodende hæves, mens patienten ligger i sengen, fjern sengehestene i den pågældende ende.

Påsætning af sengeheste


1. Tryk  og  for at slække træklagnet så meget, at sengehestene af plast kan presses ned over motorrullerne. Fastgør sengehestene mellem madrassen og mellemstangen på indersiden af motorrullerne.
2. Juster sengens højde for at sikre korrekt arbejdsstilling, når sengehestene presses på motorrullerne.
3. OBS! Når sengehestene presses ned over motorrullerne, skal afstandstappen nederst på sengehestene flygte med hoved- eller fodgærdet. Denne placering sikrer, at patienten ikke kan få fingre m.v. i klemme i spalten.
4. Husk altid at sengehestene skal monteres i fodenden før i hovedenden. Dette forhindrer, at patienten kan få en arm el.lign. i klemme mellem sengehestene.

Det er lettest at presse sengehestene skævt på motorrullerne, en bøjle ad gangen.

Sengehest- vejledning



Aftagning af sengeheste

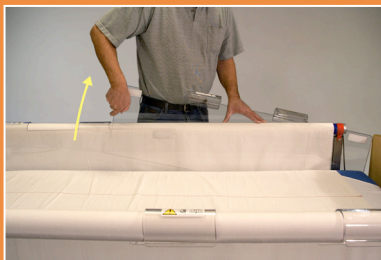

1. Juster sengens højde for at sikre korrekt arbejdsstilling, når sengehestene af plast fjernes fra motorrullerne.
2. Fjern sengehestene ved at tage fat i siden og hive skråt opad.
3. Sengehestene kan knække, hvis de kommer i klemme. Når sengehestene ikke er i brug, bør de derfor altid hænge på mellemstangen under motorrullerne.



OBS!

Hvis VENDLET benyttes som sengehest, skal sengehestene af plast anvendes, for at VENDLET opfylder alle krav til sengeheste.

Hvis sengehestene af plast ikke benyttes, når rullerne er hævet, er der risiko for:

- At den tragtformede åbning mellem sengegavlne og VENDLET er større end 6 cm. Dette kan medføre fastklemning.
- At afstanden mellem sengerrammen og underkanten af motorrullen er større end 12 cm. Dette kan medføre, at den sengeliggende kan falde ud gennem denne åbning med hovedet eller fødderne først med risiko for fastklemning.

Vendlet ApS påtager sig intet ansvar, hvis sengehestene ikke benyttes, når motorrullerne er hævet.